

Soorten afnamemateriaal Medische Microbiologie

- spuit: materialen die worden verkregen middels een spuit met naald, b.v. ascites: vervang de naald door een luer-lock alvorens het materiaal in te sturen
- steriele kweekpotjes: doorzichtige potjes met gele schroefdop voor het inzenden van diverse materialen zoals urine, sputum, pus, biopten; draai na het vullen het potje goed dicht
- steriele wat op witte kunststofdrager zonder transportmedium (witte dop) t.b.v. microscopie/PCR
- steriele wat op witte kunststofdrager met transportmedium (blauwe dop) t.b.v. kweek
- steriele wat op flexibele metalen drager zonder transportmedium (oranje dop) t.b.v. PCR op *Bordetella*
- bloedkweekflesjes: bij voorkeur 3 afnames per septische periode met tussenpozen van 10-30 minuten tussen de afnames

Volwassenen: setje van aerob (blauwe dop) en anaerob (paarse dop) flesje

Kinderen: Ped fles (roze/zilveren dop)

- faecespotje (met bruine schroefdop en schepje) voor het insturen van faeces; vul het potje maximaal voor de helft; draai het potje na het vullen goed dicht
- liquorbuisjes: steriele kunststofbuisjes met een groene dop; deze buisjes zijn alleen bedoeld voor het insturen van liquor; indien serologie op liquor aangevraagd: ook altijd stolbloed afnemen en een aliquot liquor + serum bezorgen bij het CDL voor IgG/Albumine Index bepaling; NB: celtelling wordt uitgevoerd op het CDL
- PCR-afname set (COBAS) t.b.v. onderzoek op *Chlamydia trachomatis* en *Neisseria gonorrhoeae*; bij de set is een gebruiksaanwijzing gevoegd
- virustransportmedium; de houdbaarheidsdatum is vermeld op het etiket; breng hierin het te onderzoeken materiaal; het afgenomen materiaal dient zo spoedig mogelijk te worden afgeleverd op het laboratorium Medische Microbiologie; indien dit niet mogelijk is moet dit bij 4°C bewaard worden tot de eerstvolgende werkdag
- BAL afname set; afnameset van 4 buizen van 50 ml met starand samen met een specifiek aanvraagformulier
- DFT-afname set voor parasitologisch faecesonderzoek; set van 2 potjes; potje A is ongefixeerd, potje B bevat SAF-fixatief; bij de set is een

gebruiksaanwijzing bijgevoegd alsmede een verplicht in te vullen blauwe vragenlijst

- Acanthamoeba agars staan klaar in de afgifte koelkast en worden dagelijks bijgevuld door het laboratorium.
- specifieke onderzoeken; voor specifieke onderzoeken/afdelingen is alleen na overleg met het laboratorium speciaal materiaal beschikbaar; neem bij specifieke vragen contact op met de dienstdoende viroloog/bacterioloog (sein 65220, resp. 65230 (snijdend specialismen) dan wel 66620 (beschouwend specialismen))