


Bloed verzamelen via vingerprik met monsterverzamelaar

QuikRead go® easy CRP

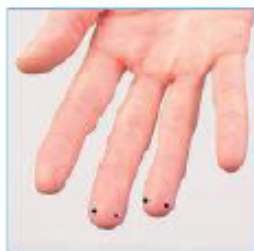

1. Neem het bloed van een warme of opgewarmde hand. Monster name liefst aan zijkant topje middel- of ringvinger.



2. Maak de vinger schoon met alcohol of water. 1x veegen is genoeg en laat de vinger drogen.



3. Ondersteun de prikvinger met je duim. Gebruik je wijs- en middelvinger om te knijpen in de prikvinger, zodat deze opzwelt op de afnameplek.




4. Plaats de prikpen stevig op de huid en prik. Stop dan met stuwen. Zodat er weer genoeg bloed naar de vingertop kan komen.



5. Stuw opnieuw en veeg de eerste druppel bloed weg. Knijp om een nieuwe druppel bloed te verkrijgen om je buisje (capillair) te vullen. Knijp met geleid en de gehele tijd.



6. Houd het capillair bijna horizontaal vast, net beneden het oppervlak waar het bloed komt. Vul het capillair gedeelte van het monsterverzamelaar helemaal.

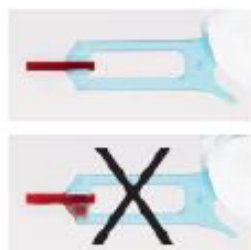

7. BELANGRIJK !!!!

Controleer of het capillaire deel helemaal gevuld is (geen luchtbellens). Veeg niet langs de monsterverzamelaar, dit kan de uitslag beïnvloeden. Als er toch teveel bloed in de monsterverzamelaar is gekomen gooi deze dan weg en neem een nieuw capillair af.

QuikRead go[®]



easy CRP

Sample type	Whole blood, serum, plasma
Sampling	Sample collector (10 µl)
Sample volume	10 µl
Sample stability in test cuvette	2 h
Measurement results within	2 min
Measuring range	1–200 mg/l
Unique combination: 1 analysis – 2 results	—
Number of tests	50
Storage	2–25°C
Software version	7.6.2 or newer
QuikRead go Instrument connectivity to HIS and LIS systems	yes

Bij storing of bestelling kunnen jullie contact opnemen met Point of Care team:

Telefoonnummer : 043-3874701

Via E-mail : poct.cdl@mumc.nl