

Gebruiksaanwijzing voor het vullen van de urinebuizen



1		Controleer of het deksel goed is gesloten en kleef meteen de identificatiesticker op de urinebuizen.
2		Zwenk het urinepotje rustig 3 tot 5 keer.
3		Zet het potje rechtop op een vaste ondergrond (bijvoorbeeld op een tafel). Trek de beschermende sticker weg (niet verwijderen!).
4		Houd het potje goed vast en duw de dop van de buis in de opening van de afnamepunt. De naald van de afnamepunt wordt door de dop heengeprikt. Als de buis stopt met vullen, de buis uit het afnamepunt trekken. Herhaal deze procedure voor elke buis die nodig is.
5		Kleef de beschermende sticker weer over de opening en meng de buizen door ze rustig 8 tot 10 keer te zwenken.
6		Stuur de buizen samen met het aanvraagformulier zo snel mogelijk naar uw laboratorium voor het urineonderzoek.